


Module de Commande

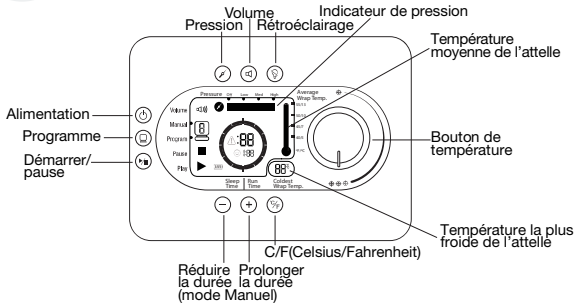

Étape 1



Remplissez le contrôleur avec de la glace et de l'eau.

Étape 2



Branchez l'adaptateur secteur sur le contrôleur, puis reliez le contrôleur à une prise de terre.

Étape 3



Mettez en place l'attelle de votre choix.

Étape 4



Reliez le tuyau connecteur sur le contrôleur, puis reliez le tuyau à l'attelle puis au contrôleur.

Étape 5



Appuyez sur le bouton d'alimentation.

Étape 6



Réglez la température au minimum. Attendez deux minutes avant de régler la température désirée.

Étape 7



Réglez la pression et la durée en mode Manuel ou sélectionnez un programme en mode Programme.

Étape 8



Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour commencer.

Mise en place de l'attelle

Attelle du genou



Étape 1

En position assise, étendez la jambe avec le talon posé sur le sol ou surélevez-la sur une table ou sur un coussin.



Étape 2

Fixez l'attelle confortablement autour du genou. Raccordez le tuyau connecteur à l'attelle, puis connectez-le au Contrôleur.




Étape 3

Durant le traitement, maintenez la jambe surélevée, dans une position confortable.


Important : Avant la toute première utilisation de votre enveloppe, il est préférable de réaliser la procédure suivante : mettez l'enveloppe à plat connectée à la machine, réglez la pression sur nulle et faites un cycle d'environ 1 minute. (NB : Cette procédure permet également de régler les erreurs 4 et 10)

Attelle de l'épaule (exemple de l'épaule droite)

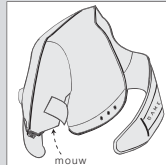


Étape 1

Formez un anneau pour le bras avec la fixation velcro élastique de l'attelle.

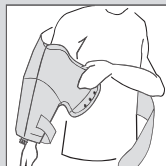


Étape 2

Passes le bras blessé à l'intérieur de l'anneau ; le tuyau connecteur doit alors courir le long du bras.

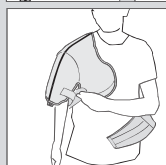


Étape 3

Passes la main valide sous le bras blessé, attrapez la fixation velcro, tirez-la vers l'avant de l'attelle puis attachez-la sur la poitrine, au niveau de l'aisselle.

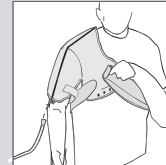

Étape 4

Attrapez la large bande dans le dos, faites-la passer sous le bras valide et en travers de la poitrine, puis attachez-la solidement sur le devant de l'attelle. (Pour les poitrines larges, une rallonge d'attelle est disponible).

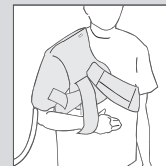

Étape 5

Utilisez l'attache de l'écharpe facultative conformément aux instructions. Attention : l'attelle de l'épaule ne doit pas être utilisée sous haute pression.

Après l'utilisation, laissez toujours sécher le manchon ouvert.

Résolution des problèmes

Si votre Système Game Ready™ ne fonctionne pas correctement :

1. Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché sur une prise électrique qui fonctionne.
2. Dans le cas d'une batterie rechargeable, vérifiez que celle-ci est bien chargée.
3. Assurez-vous que le bouton d'alimentation et le bouton « démarrer » soient enclenchés.
4. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de glace et d'eau dans le compartiment à glace.
5. Regardez sur l'écran si un code erreur est affiché puis reportez-vous à la section correspondante du présent manuel, ou consultez la section « Dépannage » du manuel d'utilisation du contrôleur.
6. Si le problème persiste, appelez votre revendeur.

ERREUR D'AUTOTEST

QUE FAIRE?



Le code 02 indique un problème avec la pompe à air. Le code 12 indique un problème dans le trajet de liquide. Dans les deux cas, déconnectez l'attelle du contrôleur. Éteignez le contrôleur puis rallumez-le, sans attelle connectée.

ALARME POMPE SÈCHE

QUE FAIRE?



Démarrez le contrôleur réglé sur le froid maximum, avec au moins 5 à 7 centimètres d'eau dans le compartiment à glace. Branchez les deux tuyaux connecteurs (un clic se fait entendre). Éteignez le contrôleur puis rallumez-le. Faites fonctionner le contrôleur pendant une minute en mode « No pressure » (sans pression), en posant l'attelle sur une surface plane (et non sur le corps). Si l'alarme continue de sonner, débrancher le tuyau connecteur du contrôleur, baisser entièrement la pression de la valve de la sortie d'eau (la première des 3 valves de connexion) pendant 3 secondes. La valve ne doit être couverte qu'à moitié afin de libérer un flux régulier.

SUR-PRESSION

QUE FAIRE?



Cette erreur peut être résolue en éteignant le contrôleur puis en le rallumant. Remettez l'attelle en place de manière à ce qu'elle soit correctement ajustée contre la partie du corps traitée. Assurez-vous que la position dans laquelle se trouve le patient au début du traitement soit stable pendant toute la durée du traitement (des mouvements pourraient entraîner des bouchons d'air dans la pompe).

SOUS-PRESSION

QUE FAIRE?



Une fois que le traitement est terminé, testez le même niveau de pression avec une autre attelle. Lorsque vous aurez déterminé si le problème est dû à une pièce particulière, appelez votre revendeur ou le Service client de Game Ready.

ERREUR SYSTEME

QUE FAIRE?



Éteignez le contrôleur et rallumez-le. Si le problème persiste, éteignez le contrôleur pendant 20 minutes avant de le rallumer.

DEBIT BAS

QUE FAIRE?



Démarrez le contrôleur réglé sur le froid maximum, avec au moins 5 à 7 centimètres d'eau dans le compartiment à glace. Vérifiez qu'il n'y ait pas de nœud dans le tuyau ou l'attelle qui pourrait provoquer une baisse du débit. Branchez les deux tuyaux connecteurs (un clic se fait entendre). Re-positionner l'attelle correctement. Faites fonctionner le contrôleur pendant une minute en mode « No pressure » (sans pression), en posant l'attelle sur une surface plane (et non sur le corps).



Bande de cheville



Bande de genou



Bande de genou articulée



Bande de coude




Bande de hanche/aîne



Bande de dos



Bande de poignet

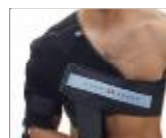

Bande d'épaule