


Gebruik bedieningseenheid

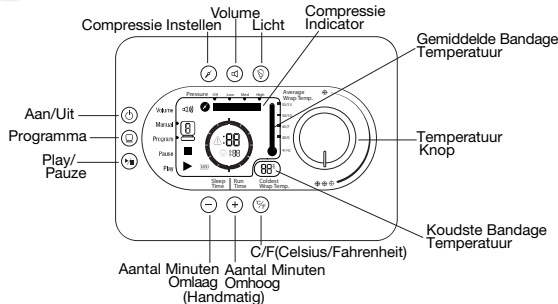

Stap 1



Vul de bedieningseenheid met ijs en water.

Stap 2



Sluit de bedieningseenheid aan op de wisselstroomadapter en steek de stekker in een geaard stopcontact.

Stap 3



Breng de geselecteerde bandage aan.

Stap 4



Sluit de verbindingsslang aan op de bandage en vervolgens op de bedieningseenheid.

Stap 5



Druk op de aan/uit-knop.

Stap 6



Stel de temperatuur in op de koudste stand. Na twee minuten aanpassen als nodig.

Stap 7



Stel compressie en tijd in bij stand Manual (Handmatig) of selecteer programma in stand Program.

Stap 8



Druk op de knop play/pauze om te starten.

TIP: Bij het eerste gebruik verdient het aanbeveling om de bandage op een plat vlak te leggen, aan te sluiten op de bedieningseenheid (slang) en een minuut ZONDER DRUK op minimale temperatuur door te spoelen.

Bandage aanbrengen

Kniebandage



Stap 1

Strek het been, zittend, en leg de hiel op de grond, tafel of op een kussen.



Stap 2


Maak de bandage zo vast dat het comfortabel strak aanvoelt. Sluit de verbindingsslang aan op de bandage en dan op de bedieningseenheid.



Stap 3


Houd tijdens de behandeling uw been hoog in een comfortabele houding.

Schouderbandage (Hier te zien op de rechter schouder)

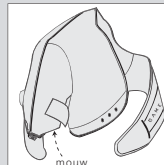


Stap 1

Verbind de elastische riem met klittenband en vorm zo de mouw.

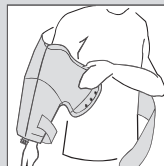


Stap 2

Haal de gekwetste arm door de mouw; de verbindingsslang moet nu langs uw arm hangen.

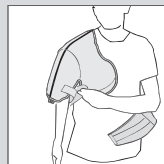


Stap 3

Haal van onder uw gekwetste arm de klittenbandriem en trek hem naar voren. Verbind hem vlak bij uw onderarm op uw borst.

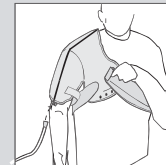

Stap 4

Pak de grote riem die langs uw rug loopt, haal hem onder uw goede arm door en over de borst en verbind hem aan de voorkant van de bandage.

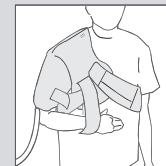

Stap 5

Gebruik de optionele mitella als aanbevolen.

Pas op: Gebruik de schouderbandage niet op de hoogste drukstand.

Na gebruik, de wrap steeds geopend laten drogen.

Foutoplossende tips

Als uw Game Ready™ systeem niet naar behoren functioneert:

- Controleer of de adapter goed in een werkend stopcontact is bevestigd.
- Als u gebruik maakt van de oplaadbare batterij, zorg er dan voor dat deze goed opgeladen is.
- Zorg ervoor dat zowel het aan-/uitknopje als het startknopje ingedrukt zijn.
- Zorg ervoor dat de ijsbak voldoende gevuld is met ijs en water. Tijdens het functioneren van het systeem komt, bij de koudste stand, water uit de terugvoer in de ijsbak. Controleer dat.
- Controleer het scherm of u een error-code ziet. Hiernaast vindt u wat u moet doen bij welke code. Anders kunt u ook nog de Handleiding van de bedieningseenheid raadplegen voor tips.
- Als u het probleem niet zelfstandig kunt oplossen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij de distributeur BMR.

ZELF-TEST FOUT

WAT U MOET DOEN:



Code 02 geeft aan dat er een probleem is met de luchtpomp. Code 12 geeft aan dat er een probleem is met de vloeistofdoorloop. In beide gevallen moet u de bandage loskoppelen van de bedieningseenheid, uitschakelen en daarna weer aan, laat daarbij de bandage losgekoppeld.



DRUGE POMP ALARM

WAT U MOET DOEN:



Start de bedieningseenheid op de koudste stand met voldoende water in de ijsbak. Verbind de bandage d.m.v. de slang; u hoort een duidelijke klik. Zet de bedieningseenheid uit en weer aan. Laat de eenheid voor een minuut lopen in de stand "No Pressure" (geen druk). Leg daarbij de bandage op een platte ondergrond. Als de code blijft, maak de verbindingsslang los van de bedieningseenheid en druk het bovenste van de drie ventielen gedurende 2-3 seconden in. Het ventiel niet helemaal bedekken.

OVERDRUK

WAT U MOET DOEN:



Dit probleem kunt u oplossen door de bedieningseenheid uit te zetten en daarna weer aan. Doe de bandage weer om het lichaam zodat het comfortabel strak zit. Zorg ervoor dat de patiënt in dezelfde houding blijft gedurende de hele behandeling (beweging van de patiënt kan ervoor zorgen dat lucht naar de pomp terugstroomt).



Als de behandeling is afgelopen, probeer dan een andere bandage, als u die tot uw beschikking heeft, met dezelfde druk. U kunt zo achterhalen of het probleem geïsoleerd ligt in 1 component. U kunt dan bellen met uw contactpersoon of met de Game Ready klantenservice.

SYSTEEM FOUT

WAT U MOET DOEN:



Zet de bedieningseenheid uit en weer aan. Als dit niet werkt, laat hem dan voor 20 minuten uit en probeer het dan nog eens.



Start de bedieningseenheid op de koudste stand met voldoende water in de ijsbak. Controleer de slang en bandages op "knikken". Verbindt de slang aan beide kanten; u hoort een duidelijke klik. Doe de bandage weer om het lichaam zodat het comfortabel strak zit. Laat de eenheid voor 1 minuut lopen op "No Pressure" (geen druk) met de bandage op een platte ondergrond.



Enkelbandage



Kniebandage



Flexibele kniebandage



Elleboog-/kuitbandage




Heup-/liesbandage



Rugbandage



Polsbandage

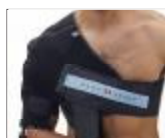

Schouderbandage